

QuikRead® FOB



Načtěte kartu.



1 Dávkovačem odměřte do kyvety 1 ml pufru.



2 Protřeptejte odběrovou lahvičku a prvních 5 kapek odkapejte mimo test. Další dvě kapky vzorku přidejte do kyvety.



3 Kyvetu zavřete víčkem s činidlem, promíchejte (ne dnem vzhůru), vložte do otvoru pro měření a změřte blank (max 20 sekund).



4 Přidejte činidlo stlačením vnitřní hnědé části víčka.



5 Kyvetu vyndejte a důkladně míchejte obrácením dna vzhůru. Sledujte displej přístroje a čekejte na pípnutí.



6 Vložte kyvetu zpět do otvoru pro měření. Za 2 min. se na displeji objeví výsledek pozitivní nebo negativní.