

ODBĚR VZORKU A PŘÍPRAVA



U pacientů se před odběrem stolice nepožaduje speciální dieta. Vzorek okamžitě zpracujte.

Návod k odběru vzorku stolice:

1. Otevřete lahvičku řádně označenou údaji pacienta.
2. Krouživým pohybem odeberte vzorek ze tří až šesti míst stolice pomocí tyčinky ,ukotvené ve víčku lahvičky. Ujistěte se, že na tyčince ulpělo vhodné množství stolice. Dostačující je množství ve velikosti kuličky černého pepře. Nadbytečné množství vzorku může ucpat filtr ve víčku lahvičky. Pozor, řidší vzorky stolice nemusí na tyčince ulpět dobře.
3. Tyčinku vsuňte zpět do lahvičky a pečlivě uzavřete víčko. Důkladně promíchejte vzorek v lahvičce s roztokem. (Roztok, který obsahuje vzorek je stabilní 5 dní při 2...25°C, pokud je uchován v temnu.)
4. Lahvičku doneste svému lékaři.